

CATALOGUE 2021 2022

ORTHOPLASTIE

Silicone poly-addition SICASIL	Page 2
Silicone de RÉPARATION	Page 3
VERNIS de finition	Page 3
Accessoires d' APPLICATION	Page 3
Orthoplastie TRAMÉE	Page 3

Silicone poly-addition Sicasil

Le silicone bi-composant se présente sous forme de deux pâtes de consistance identique :

- Rose (base)
- Blanche (catalyseur).

Mélangées ensemble, elles permettent d'obtenir un produit d'orthoplastie prêt à être utilisé.

Le lot comprend deux pots de 250 grammes chacun (A+B).

Utilisation

Prélever une quantité identique des produits A et B. Ensuite, bien les mélanger pendant une (1) minute. Le produit est prêt à être utilisé.

Le temps de polymérisation est d'environ 3 minutes à température ambiante de 20 °C.

Pour le Sicasil ferme et souple, le ponçage peut intervenir après la polymérisation, alors que pour le Sicasil super souple et extra souple, il faut attendre 24 heures avant le ponçage.



SICASIL FERME

N° de produit : 0130

Application

Pour tous les types d'orthoplasties



SICASIL SOUPLE

N° de produit : 0131

Application

Pour des orthoplasties de protection et de confort



SICASIL SUPER SOUPLE

N° de produit : 0132

Application

Pour des orthoplasties interdigitales



SICASIL EXTRA SOUPLE

N° de produit : 0142

Application

Pour des orthoplasties d'hyperprotection

Idéal pour :

- Pieds diabétiques
- Pieds rhumatoïdes

Recommandations

- Ne jamais utiliser la même spatule ou les mêmes doigts pour les deux pots, afin de ne pas créer une polymérisation à l'intérieur des pots.
- Ne jamais échanger les couvercles des pots A et B.
- Ne pas utiliser de gants en latex ou nitrile.
- Afin de ne pas perturber la polymérisation, bien se laver les mains avec un savon neutre avant de fabriquer vos orthoplasties.
- Éviter d'utiliser des solutions alcooliques pour le lavage de vos mains.
- Certains produits cosmétiques, comme les crèmes hydratantes, peuvent également perturber la polymérisation.
- Afin de conserver adéquatement le Sicasil, il est important de stocker celui-ci à une température inférieure à 30 °C.

SILICONE DE RÉPARATION



**SILICONE DE
RÉPARATION
SICAFLEX**

N° de produit : 0135S



**LOT DE 5 EMBOUTS
DE MÉLANGE POUR
SICAFLEX**

N° de produit : 0135E

VERNIS DE FINITION



VERNIS DE FINITION

N° de produit : 0111S



**LOT DE 5 EMBOUTS
DE MÉLANGE POUR
VERNIS**

N° de produit : 0111E

ACCESSOIRES D'APPLICATION



**SERINGUE
D'INJECTION**

N° de produit : 0139



**EMBOUTS
JETABLES**

N° de produit : 16105E

Lot de 100

ORTHOPLASTIE TRAMÉE



**TRAME
D'ORTHOPLASTIE**

N° de produit : 0137

Lot de 3 bandes de
50 x 6 cm